

Multi-Oral[®] GEL - Bij aften en pijnlijke plekjes



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en bewaar deze goed.

Gebruiken bij

Multi-Oral Gel is een medisch hulpmiddel dat effectief werkt bij aften, wondjes, zweertjes, blaartjes en pijnlijke, geïrriteerde, gezwollen of ontstoken plekjes in de mond.

Multi-Oral Gel

Multi-Oral Gel voorkomt en behandelt problemen van mondweefsel en tandvlees:

- Verlicht pijnlijke plekjes, aften en irritaties in de mond
- Behandelt tandvleesinfecties (ontstekingen)
- Vormt een onzichtbaar werkzaam laagje over tandvlees en pijnlijke plekjes
- Ondersteunt het natuurlijke genezingsproces
- Verzorgt en optimaliseert tandvlees en mondslijmvlies
- Neutraliseert schadelijke bacteriën
- Is natuurlijk en kan gewoon doorgeslikt worden

Hoe werkt Multi-Oral Gel?

Multi-Oral gel is een geconcentreerde, natuurlijke gel die een onzichtbaar werkzaam laagje vormt over tandvlees en pijnlijke plekken. De gel bevat plantaardige extracten die de mondflora optimaliseren en schadelijke bacteriën op een natuurlijke manier neutraliseren. Multi-Oral Gel verzacht en verlicht geïrriteerd tandvlees, pijnlijke plekken en aften. Bovendien ondersteunt Multi-Oral Gel de natuurlijke genezing van beschadigd weefsel.

Multi-Oral Gel is geregistreerd als medisch hulpmiddel klasse IIa bij de indicaties:

- Aften, blaartjes, irritaties en pijnlijke plekken
- Ontstoken tandvlees (gingivitis en parodontitis)
- Wondjes en pijnlijke plekjes na een tandheelkundige behandeling
- Irritatie van tandvlees en slijmvliezen door het dragen van een beugel of kunstgebit

Gebruiksaanwijzing

Multi-Oral Gel kan met het applicatietuigtje direct worden aangebracht op de zere plek, het geïrriteerde tandvlees of ander beschadigd weefsel. Multi-Oral Gel vormt een onzichtbare bio-actieve laag over het mondweefsel.

• Breng 2-4x daags een kleine hoeveelheid aan op de pijnlijke plek(ken).

- Voor het meest optimale effect de gel 30 minuten laten inwerken zonder in die tijd te eten, te drinken of de mond te spoelen. Probeer om de gel niet met de tong te verwijderen.
- De gel is natuurlijk en kan gewoon doorgeslikt worden.
- Multi-Oral gel mag ook in combinatie met medicatie worden gebruikt.

Samenstelling

Multi-Oral Gel is een geconcentreerde gel, gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex*. De bio-actieve formule:

- Is natuurlijk en kan met een gerust gevoel doorgeslikt worden
- Tast de tanden niet aan en veroorzaakt geen vlekken of verkleuring
- Beschermt en optimaliseert de mondflora
- Heeft een natuurlijke, frisse smaak
- Bevat geen conserveringsmiddelen of bestanddelen van dierlijke oorsprong

Werkzame ingrediënten

Galactoarabinan Polyglucoron Acid Crosspolymer*, Glycerin, Betaine, Xylitol, Menthol.

*2QR-complex, gepatenteerde bio-actieve polysacchariden van plantaardige oorsprong.



Wat moet u weten voordat u Multi-Oral Gel gebruikt?

- Bij aanhoudende of terugkerende klachten is het raadzaam om altijd een arts of tandarts te raadplegen.
- Allergieën voor bestanddelen van Multi-Oral Gel zijn zeer zeldzaam. Breng bij twijfel een klein beetje gel aan op de binnenkant van uw onderarm en laat dit enige tijd zitten. Wanneer er een jeukende, rode plek verschijnt, adviseren wij u om Multi-Oral Gel niet te gebruiken.

Gebruik bij kinderen en ouderen

Aangezien Multi-Oral Gel doorgeslikt kan worden, is het geschikt voor gebruik bij kinderen vanaf 4 jaar, ouderen of mensen met een beperking die de gel gemakkelijk doorslikken.

Multi-Oral[®] GEL - Bij aften en pijnlijke plekjes



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en bewaar deze goed.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van Multi-Oral Gel tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Interferentie met geneesmiddelen

Multi-Oral Gel interfereert niet met geneesmiddelen.

Bewaren

Bewaren op kamertemperatuur is aanbevolen. Temperaturen lager dan 5°C en hoger dan 25°C worden afgeraden. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Gebruik Multi-Oral Gel niet na de houdbaarheidsdatum die op het doosje en de tube staan.

Kleur van de gel

De kleur van Multi-Oral Gel kan variëren. Dit heeft te maken met het belangrijkste natuurlijke ingrediënt: zQR-complex. Hierdoor kunnen de producten variëren in de kleur van transparant tot licht-donker amber. De kleur heeft geen invloed op de werkzaamheid van het product.

Mondzweetjes of aften

Aften zijn gevoelige zweetjes die overal in de mond kunnen voorkomen. Het zijn de meest voorkomende type mondzweetjes, die verschijnen als kleine, ronde bolletjes in het mondslijmvlies. Minstens 1 op de 5 mensen heeft tijdens hun leven wel eens last van aften of zweetjes in de mond.

De oorzaken van mondzweetjes of aften kunnen zijn:

- Een lage weerstand
- Beten in de binnenkant van de mond
- Schade aan het mondslijmvlies door bijvoorbeeld een tandenborstel
- Kleine brandwondjes door het nuttigen van heet voedsel of hete dranken
- Kunstgebitten, beugels of een ruw tandoppervlak

Tandvleesaandoeningen

Tandvleesaandoeningen en paradontale ziektes worden gekenmerkt door pijn of ontsteking van het weefsel dat de tanden ondersteunt. Het woord paradontaal betekent letterlijk "rond de tand". Paradontale ziektes zijn chronische bacteriële infecties die invloed hebben op het tandvlees en het tandbot. Er zijn twee belangrijke tandvleesaandoeningen: gingivitis en parodontitis. Gingivitis kenmerkt zich door ontstoken, bloedend, rood, pijnlijk, geïrriteerd en/of gezwollen tandvlees. Langdurige gingivitis kan leiden tot parodontitis waarbij ook het steunweefsel rond de tand wordt aangetast (tandvlees en tandbot). Raadpleeg uw (tand)arts bij deze klachten.

Naar schatting heeft 94% van alle volwassenen in meer of mindere mate last van ontstoken tandvlees.

Oorzaken van tandvleesaandoeningen zijn o.a.:

- Opeenstapeling van tandplak
- Slechte mondhygiëne
- Medicijngebruik
- Hormonale veranderingen bij meisjes/vrouwen
- Verminderde speekselproductie (droge mond)
- Scheve tanden
- Slecht passende beugel of kunstgebit
- Slechte eetgewoontes
- Bloedafwijkingen

Ook verkrijgbaar:

Multi-Oral Spray

Bij droge mond

Multi-Oral RemiDent

Bij gevoelige tanden en bloedend tandvlees

Akkoord 9/9/2015

Charlie Paludanus

Distributeur:

Biohorma B.V., J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg, Nederland



Fabrikant:

Multi-Oral BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nederland

WWW.MULTI-ORAL.NL



I15
BH210I.1
07788698